

新品上市

681 系列鼻塞导管

681 SERIES NASAL CANNULA



鼻塞导管—成人型



鼻塞导管—小儿型

售后服务热线：400-189-8322
400-189-8322

特点 Features

- 适用于慢性阻塞肺病，呼吸衰竭以及术后需要供氧的患者
- 需配合呼吸湿化治疗仪器或空气混合器、加湿罐和加热管路使用，向病患输送具有湿度和温度的气体
- 采用柔软硅胶材质，避免对鼻孔造成伤害，减少患者不适感
- 婴儿鼻塞采用医用级水胶体贴片进行固定，无过敏及胶液残留
- 型号规格齐全，从婴儿到成人各年龄段患者及气管切口患者均可使用
- 产品符合 YY/T 1040.1 标准，采用外径 22mm 和内径 15mm 的圆锥接头，可与市场主流呼吸管路连接
- 产品为一次性使用，单次使用不得超过 7 天

鼻塞导管—成人型 Nasal Cannula - Adult

松紧带调节，方便固定于正确的位置

医疗级硅胶，柔软舒适
避免对鼻孔造成伤害

单管设计可方便患者在治疗时交谈或进食


可通过调节旋钮进行微调，佩戴更舒适

管夹采用不同颜色区分型号，方便识别；
并可将鼻塞导管固定在衣服上，避免导管单边下坠，防止倾斜移位

标准接头，可与市场主流呼吸管相连接




操作指南 Fitting Guide

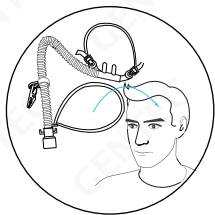


STEP 1

将挂绳挂在患者脖颈上，松紧带套在头上，固定于耳朵上方

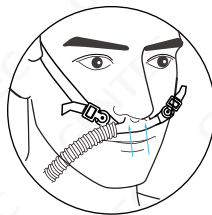


STEP 2

将鼻接头轻插入鼻孔，使其位于鼻中隔下方，与鼻孔之间需有明显的间隙

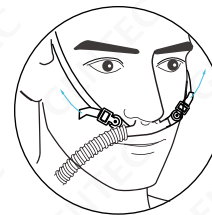


STEP 3

调整松紧带，固定鼻接头位置

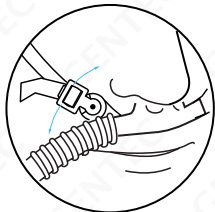


STEP 4

调节旋钮进行面部微调，使患者佩戴更舒适

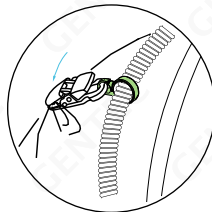

STEP 5

滑动管夹，将鼻塞导管固定在患者衣服上，防止下坠、倾斜、移位

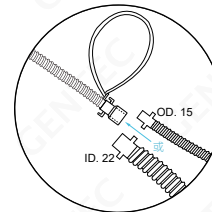

STEP 6

将接口与内径 22mm 或外径 15mm 接头的呼吸管路相连接

订购指南 Ordering Information

	产品名称	型号	流量范围	管夹颜色
	鼻塞导管成人 L	681-101	≤ 60L/min	绿色
	鼻塞导管成人 M	681-102	≤ 60L/min	紫色
	鼻塞导管成人 S	681-103	≤ 60L/min	黄色

鼻塞导管—小儿型 Nasal Cannula - Neonatal

采用医用水胶体贴片
固定鼻塞导管，无过敏、
无胶液残留

标准接头，可与市场主流
呼吸管相连接



双翅膀设计，方便固定鼻塞
导管，医疗级硅胶，柔软舒适，
避免对鼻孔造成伤害


管夹采用不同颜色区分型号，
方便识别；
调整滑动管夹至合适位置，
固定鼻塞导管

双管采用柔韧性好、质量轻的
加筋管，既可保证通气量，又
可防止折弯

操作指南 Fitting Guide




鼻塞导管
小儿型

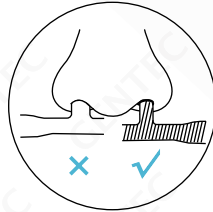


STEP 1

根据患者鼻孔的大小选
择小于鼻孔内径 50%
的型号

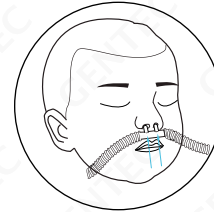


STEP 2

将鼻接头轻插入鼻孔，
使其位于鼻中隔下方，
与鼻孔之间需有明显的
间隙

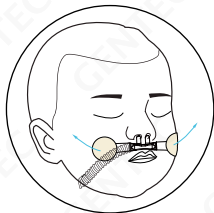


STEP 3

撕开水胶体贴片，先粘
于鼻接头翅膀处，再贴
于脸部，以同样的方式
固定两边

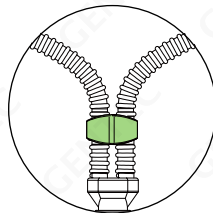

STEP 4

调整滑动管夹至合适
位置，固定鼻塞导管

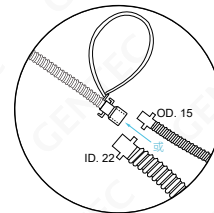

STEP 5

将接口与内径 22mm
或外径 15mm 接头的
呼吸管路相连接

订购指南 Ordering Information

	产品名称	型号	流量范围	适用年龄	适用体重	管夹颜色
	鼻塞导管小儿 XL	681-200	≤ 25 L/min	2 岁 ~ 3 岁	8 ~ 12.5 kg	蓝色
	鼻塞导管小儿 L	681-201	≤ 25 L/min	1 岁 ~ 2 岁	5 ~ 12 kg	绿色
	鼻塞导管小儿 M	681-202	≤ 20 L/min	37 周 ~ 1 岁	3 ~ 10 kg	紫色
	鼻塞导管小儿 S	681-203	≤ 8 L/min	32 周 ~ 6 月	2 ~ 8 kg	黄色
	鼻塞导管小儿 XS	681-204	≤ 8 L/min	< 26 周 ~ 37 周	1 ~ 3 kg	红色

